


腸内細菌検査の提出方法

「採便容器」と「便の採取方法」についてご確認ください。

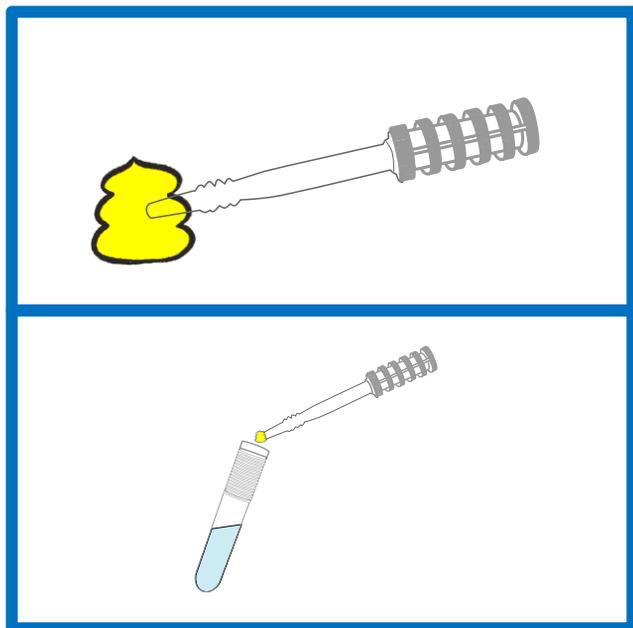

- ①容器のキャップを静かに抜きます。
※いきおいよくキャップを外すと、中の培地が飛び出すことがありますのでご注意ください。
- ②先のネジヤマ部分に便を少量採取します。
(便に突き刺すくらいで結構です。)
- ③便が容器のふちに付かないように閉めてください。



- ①容器用ラベルに施設名と氏名を記入して、白色の検体容器に貼ってください。
 - ②検査袋に表記事項を記入してください。
- 提出日に採取が困難と思われる方は2~4日前の採取が可能となりますが、原則的には提出日朝の採取をお願い申し上げます。
 - 白色の容器には保存用培地が入っていますので、なるべく高温多湿は避け冷暗所での保管をお願いします。

検体と一緒に「腸内細菌検査及びノロウイルス検査依頼書」を必ず同封してください。



国産薬品工業株式会社
エーケン事業部

登録衛生検査所 登録番号 第213401号

20221205